

Manual do usuário

Microcânula Slim Fabinject
Cânula Bico de Pato
ANVISA 80213730020

Microcânula Slim

Cânula para subcisão (Bico de Pato)

Fabricado no Brasil por:

Fabinject Ind. Com. Imp. Exp. Eireli

Rua Eng. João Porfírio de Macedo, 401

Distrito Industrial do Una - Taubaté-SP - CEP 12.072-270

Telefone +55 (12) 3602-1415 - email: loja@fabinject.com.br

Responsável técnico Gianmaria Cominato Filho - CREA 5069327980

Introdução:

A Microcânula Slim Fabinject é a primeira cânula para aplicação de biomateriais injetáveis, tais como preenchedores faciais e corporais, fabricada no Brasil. Isso garante sua rastreabilidade de lote, certeza de esterilização no Brasil, com laudo e adequação às Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.

A Microcânula BP consiste em uma espécie de agulha com ponta bico de pato, porém com duas diferenças fundamentais:

- Sua ponta possui bico de pato e com abertura ampla na lateral.
- O material a ser injetado sai pela lateral da mesma e não pela ponta superior.

Sua característica permite realizar subcisão atraumática, na correção de sulcos, cicatrizes deprimidas e outras alterações do relevo cutâneo, incluindo a celulite. Age no deslocamento de tecido fibroso e aplicação simultânea, utilizando ácido hialurônico e outros preenchedores devidamente certificados.

As microcânulas BP são fabricadas em aço inoxidável, possuem ponta bico de pato, tubulares e furadas lateralmente, com uma tampa de plástico olefínico, cujo canhão possui padrão de rosca Luer-Lock, adaptável em seringas comuns descartáveis.

Vantagens de uso da cânula BP:

- Impede injeção intra-vascular inadvertida;
- Elimina o risco de embolização de vasos;
- Reduz o risco de hematomas e equimoses;
- Tamanhos variados para aplicação em diferentes áreas;
- Abertura lateral da ponta da microcânula Slim Fabinject assegura uma aplicação precisa do material a ser injetado;
- As Microcânulas Slim Fabinject possuem uma fina parede feita de aço de alta qualidade, e sua superfície lisa assegura uma introdução sem traumas.

Disponível em embalagem com 05 unidades estéreis, nos seguintes tamanhos e referências:

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15G-30 | 17G-45 | 18G-110 | 20G-37 | 21G-90 |
| 15G-50 | 17G-50 | 18G-120 | 20G-38 | 21G-100 |
| 15G-70 | 17G-57 | 19G-13 | 20G-40 | 21G-110 |
| 15G-80 | 17G-60 | 19G-16 | 20G-50 | 21G-120 |
| 15G-100 | 17G-70 | 19G-19 | 20G-57 | 22G-13 |
| 15G-110 | 17G-80 | 19G-25 | 20G-60 | 22G-16 |
| 16G-25 | 17G-90 | 19G-30 | 20G-70 | 22G-19 |
| 16G-30 | 17G-100 | 19G-32 | 20G-80 | 22G-25 |
| 16G-38 | 17G-110 | 19G-38 | 20G-90 | 22G-30 |
| 16G-40 | 18G-13 | 19G-40 | 20G-100 | 22G-32 |
| 16G-50 | 18G-16 | 19G-50 | 20G-110 | 22G-37 |
| 16G-70 | 18G-19 | 19G-57 | 21G-13 | 22G-38 |
| 16G-80 | 18G-25 | 19G-60 | 21G-16 | 22G-40 |
| 16G-100 | 18G-30 | 19G-70 | 21G-19 | 22G-50 |
| 16G-110 | 18G-32 | 19G-80 | 21G-25 | 22G-57 |
| 17G-120 | 18G-37 | 19G-90 | 21G-30 | 22G-60 |
| 17G-13 | 18G-38 | 19G-100 | 21G-32 | 22G-70 |
| 17G-16 | 18G-40 | 19G-110 | 21G-37 | 22G-80 |
| 17G-19 | 18G-50 | 19G-120 | 21G-38 | 22G-90 |
| 17G-25 | 18G-57 | 20G-13 | 21G-40 | 22G-100 |
| 17G-30 | 18G-60 | 20G-16 | 21G-50 | 22G-110 |
| 17G-32 | 18G-70 | 20G-19 | 21G-57 | 22G-120 |
| 17G-37 | 18G-80 | 20G-25 | 21G-60 | 23G-13 |
| 17G-38 | 18G-90 | 20G-30 | 21G-70 | 23G-16 |
| 17G-40 | 18G-100 | 20G-32 | 21G-80 | 23G-19 |

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 23G-25 | 24G-60 | 26G-25 | 27G-80 | 29G-57 |
| 23G-29 | 24G-70 | 26G-30 | 27G-90 | 29G-60 |
| 23G-30 | 24G-80 | 26G-32 | 27G-100 | 29G-70 |
| 23G-32 | 24G-90 | 26G-37 | 27G-110 | 29G-80 |
| 23G-37 | 24G-100 | 26G-38 | 27G-120 | 29G-90 |
| 23G-38 | 24G-110 | 26G-40 | 28G-13 | 29G-100 |
| 23G-40 | 24G-120 | 26G-50 | 28G-16 | 29G-110 |
| 23G-50 | 25G-13 | 26G-57 | 28G-19 | 29G-120 |
| 23G-57 | 25G-16 | 26G-60 | 28G-25 | 30G-13 |
| 23G-60 | 25G-19 | 26G-70 | 28G-30 | 30G-16 |
| 23G-70 | 25G-25 | 26G-80 | 28G-38 | 30G-19 |
| 23G-80 | 25G-30 | 26G-90 | 28G-50 | 30G-24 |
| 23G-90 | 25G-32 | 26G-100 | 28G-57 | 30G-25 |
| 23G-100 | 25G-37 | 26G-110 | 28G-60 | 30G-30 |
| 23G-110 | 25G-38 | 26G-120 | 28G-70 | 30G-32 |
| 23G-120 | 25G-40 | 27G-13 | 28G-80 | 30G-37 |
| 24G-13 | 25G-50 | 27G-16 | 28G-90 | 30G-38 |
| 24G-16 | 25G-57 | 27G-19 | 28G-100 | 30G-40 |
| 24G-19 | 25G-60 | 27G-25 | 28G-110 | 30G-50 |
| 24G-25 | 25G-70 | 27G-30 | 28G-120 | 30G-57 |
| 24G-30 | 25G-80 | 27G-32 | 29G-13 | 30G-60 |
| 24G-32 | 25G-90 | 27G-37 | 29G-16 | 30G-70 |
| 24G-37 | 25G-100 | 27G-38 | 29G-19 | 30G-80 |
| 24G-38 | 25G-110 | 27G-40 | 29G-25 | 30G-90 |
| 24G-40 | 25G-120 | 27G-50 | 29G-30 | 30G-100 |
| 24G-50 | 26G-13 | 27G-57 | 29G-32 | 30G-110 |
| 24G-55 | 26G-16 | 27G-60 | 29G-38 | 30G-120 |
| 24G-57 | 26G-19 | 27G-70 | 29G-50 | |

Observação:

- Alguns modelos de Microcânulas podem vir com uma agulha auxiliar para início de perfuração e posterior introdução da microcânula.
- Não utilizar a agulha auxiliar para aspirar ou injetar fluidos nos pacientes.

Forma de apresentação comercial do produto:

O produto Microcânula Slim Fabinject é fornecido estéril, possui tampa protetora plástica, acondicionado em envelope de papel grau cirúrgico (embalagem primária) e acondicionado em caixa de cartolina (embalagem secundária).



Indicação de uso / Finalidade:

A Microcânula Slim Fabinject é indicada para aplicação em preenchimentos estéticos e resulta em diversas vantagens, como maior segurança e rapidez para preencher planos profundos, possibilidade de atingir áreas distantes com único orifício, menor dor, traumatismo físico, edema e formação de hematomas, além de recuperação mais rápida.

As microcânulas estão disponíveis em vários comprimentos e calibres, possibilitando a realização de diferentes procedimentos de forma mais segura e eficaz. Suas dimensões podem ser codificadas de diferentes formas, que devem ser bem compreendidas pelo profissional da saúde. Tanto o sistema inglês (que usa as unidades gauge e polegadas) como o sistema métrico (que usa as unidades milímetros x milímetros) identificam o calibre e o comprimento da haste.

Princípio de funcionamento / Mecanismo de ação:

A Microcânula Slim Fabinject consiste em uma espécie de agulha, porém apresenta ponta bico de pato e abertura lateral próxima à ponta, por onde podem ser injetados materiais de preenchimento, tais como ácido hialurônico, colágeno, ácido poli-L-láctico, hidroxiapatita de cálcio (CAHA) e outros, além da transferência de gordura. A ponta bico de pato e a maior flexibilidade da microcânula permitem que a cânula deslize sob a derme com menor trauma, em vez de traumatizar tecidos e vasos como a agulha hipodérmica tradicional. Além disso, a abertura única da microcânula oferece ampla cobertura para cada ponto de entrada, o que diminui a formação de hematomas, injeções intravasculares e tempo de recuperação.

Modo de uso do produto:

- 1-) Selecione a Microcânula Slim Fabinject de tamanho adequado;
- 2-) Antes de usar, confirme a validade do produto;
- 3-) Inspeção visualmente a embalagem estéril para garantir a embalagem esteja intacta;
- 4-) Higienize a pele da área de aplicação;
- 5-) Remova a microcânula da embalagem estéril;
- 6-) Encaixe a microcânula na seringa e remova a capa protetora;
- 7-) Após o uso, recolocar a capa protetora e acondicionar na embalagem original;
- 8-) Descartar em coletor de material perfurocortante.

Advertências e precauções:

- Abrir a embalagem do produto cuidadosamente e não deixar que o produto toque em outros objetos;
- A Microcânula Slim Fabinject deve ser utilizada somente por profissional da saúde;
- Antes de utilizar o produto, fazer o diagnóstico da condição da pele do paciente, idade e estado físico;
- Antes de utilizar o produto, decidir sobre a necessidade de utilizar um anestésico;
- Não aplicar força excessiva no manuseio da Microcânula Slim Fabinject;
- Após o uso, o produto deverá ser colocado de volta na embalagem original, para fazer o devido descarte em coletor de material perfurocortante;
- Este produto não pode ser consertado;
- Produto de uso único;
- Manter o produto fora do alcance de crianças;
- Não utilizar o produto após o prazo de validade;
- Não utilizar o produto caso haja sinal de violação que comprometa a sua esterilização;
- Os produtos devem ser usados imediatamente após a remoção da embalagem estéril;
- Não é permitido o uso caso a embalagem esteja violada, ausência da capa protetora e validade vencida.

Composição:

A Microcânula Slim Fabinject é constituída de aço inoxidável AISI 304 em seu corpo e capa protetora e encaixe da cânula com a seringa em material plástico olefínico.

Condições de armazenamento:

Armazenar em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar (Temperatura: -40°C a +55 °C).

Condições para o transporte:

Transportar em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar (Temperatura: -40°C a +55 °C).

Contra indicações:

Não há.

Efeitos adversos:

Não há.

Caso seja observado algum outro efeito adverso ou haja a necessidade de realização de queixa técnica, deve ser informado por intermédio do SAC da empresa.



(12) 3602-1415

(12) 9.9686-1415

loja@fabinject.com.br

